

JOBST® FarrowWrap®

Medizinisch adaptives Kompressionssystem



Benutzerfreundliche Kompressionsprodukte fördern das Selbstmanagement

Kompressionstherapie ist ein unverzichtbarer Bestandteil in der Bandagierung venös oder lymphatisch bedingter Ödeme. In der anfänglichen Entstauungsphase sind Kompressionsbinden die erste naheliegende Wahl, und für einige Patienten bleiben diese neben medizinischen Kompressionsstrümpfen auch in der Erhaltungsphase eine gute Option, um das Ödem zu stabilisieren.

Einige Patienten haben jedoch Schwierigkeiten, eine solche Behandlung selbstständig durchzuführen. Es ist wichtig, auch diesen Menschen geeignete Kompressionsprodukte anzubieten, die effizient und bequem in der Anwendung sowie therapeutisch wirksam sind. Denn so gibt man Patienten das nötige Selbstvertrauen, um die Zügel, und somit ihr Leben, wieder in die eigene Hand zu nehmen.

Kompressionsprodukte¹ müssen:



Leicht an- und abzulegen sein



Eine therapeutisch wirksame Kompression bieten und eine hohe Steifigkeit aufweisen



Bequem zu tragen sein und sicher sitzen

¹ Harding, K., Dowsett, C., Flas, L et al.: Simplifying venous leg ulcer management: consensus recommendations. Wounds International, 2015. https://tinyurl.com/jrxfcrj (aufgerufen am 26. Februar 2017): Properties of an ideal compression system.

Medizinisch adaptive Kompression: eine innovative Lösung, die das Selbstmanagement fördert



Mit individuell anpassbaren Kompressionssystemen geben Sie Ihren Patienten ein Mittel an die Hand, mit dem sich diese selbstständiger behandeln und bessere Therapieergebnisse erzielen können.

Medizinisch adaptive Kompressionssysteme mit Klettverschluss können bei der Behandlung von Ödemen eine Alternative zu Kurzzugbinden darstellen. Beide weisen einen geringen Ruhedruck sowie einen hohen Arbeitsdruck auf und sorgen so für die nötige Kompressionswirkung.


Darüber hinaus zeichnen sich Klettbandagen durch eine hohe Benutzerfreundlichkeit aus, die den Patienten in die Lage versetzt, den Druck selbstständig anzupassen ideal etwa für ein fluktuierendes Ödem.



Ein **praktisches Produkt,** das **Selbstmanagement** fördert

Geben Sie Ihrem Patienten die Möglichkeit, sein Ödem selbstbewusst zu managen und eigenständig auf schwankende Symptome reagieren zu können.

JOBST FarrowWrap ist ein Kompressionssystem mit anpassbaren Klettbandagen aus widerstandsfähigen Materialien, das dazu dient Schwellungen an den Extremitäten zu reduzieren, Volumenreduktionen zu erhalten und die Abheilung eines Ulcus cruris venosum zu fördern. Medizinisch adaptive Kompressionssysteme bieten den gleichen, starken Halt wie mehrlagige Kompressionsverbände, haben jedoch ein benutzerfreundlicheres Design.

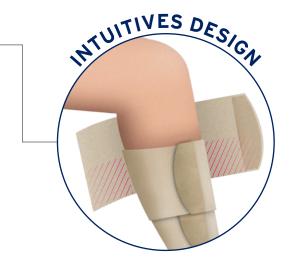

Sicher anlegen und anpassen

Bei der Entwicklung von JOBST FarrowWrap wurde besonders auf eine einfache Anwendung geachtet. Schon nach einer kurzen Einschulung sind die meisten Patienten und pflegenden Angehörigen in der Lage, den Verband selbstständig anzulegen. Das überlappende Material unterstützt eine korrekte Druckverteilung und beugt Falten vor.

Nachgewiesene Patientenzufriedenheit¹

Neue Anwendungsstudien haben gezeigt, dass 85 % der Patienten die FarrowWrap-Kompressionssysteme von JOBST einfach an ihre jeweiligen Bedürfnisse anpassen konnten. 73 % der Patienten haben die Anwendbarkeit mit gut oder sehr gut bewertet. So kann JOBST FarrowWrap auch bei der Behandlung komplexer venöser und lymphatischer Probleme eine gute Wahl sein.



Empleic • Geen • Fü for • Mi da • Mi Fa

Untere Extremitäten

JOBST® FarrowWrap®

- Lite

Strong

Empfohlen für Patienten mit leichtem bis mäßigem Ödem.

- Geeignet für Patienten mit empfindlicher Haut
- Für Patienten mit gleichmäßig geformten Extremitäten
- Mit doppeltbeschichtetem Gewebe, das widerstandsfähig und weich ist.
- Mit geringerer Kompression als FarrowWrap®-Strong

Empfohlen für Patienten mit mäßigem bis starkem Ödem.

- Geeignet bei kleineren Hautfalten und ungleichmäßig geformten Extremitäten
- Zuverlässiger Halt bei Ödemveränderungen
- Widerstandsfähiges Gewebe mit weichem Innenfutter



TG-Soft Liner

Kann auf Wunsch mit jeder Lite/
Strong Versorgung
einmal paarweise kostenlos
mitbestellt werden.

Das Model trägt einen FarrowWrap mit einem FarrowWrap ADI Liner in Beige. Letzterer ist im standardmäßigen Lieferumfang nicht enthalten.

Kompression Lite

20-30 mmHg

Kompression Strong

30-40 mmHg

Ausführungen



*Oberschenkelteil wird vorzugsweise in Kombination mit dem mitgelieferten Knieteil getragen

Pflege



bei 30 °C waschen, Wäschenetz verwenden



nicht bleichen



nicht schleudern



liegend trocknen



nicht büaeln



Farben

Beige

nicht chemisch reinigen



Obere Extremitäten

JOBST® FarrowWrap® Lite

Empfohlen für Patienten mit leichtem bis mäßigem Ödem.

- Mit eingenähtem Unterziehstrumpf für einfaches An- und Ablegen
- Geeignet für Patienten mit empfindlicher Haut



Ausführungen



Farben





Beige Schwarz*

*nur bei der Armversorgung möglich, nicht beim Handschuh

Kompression

20-30 mmHg

Pflege



bei 30 °C waschen, Wäschenetz verwenden



nicht bleichen



nicht schleudern



liegend trocknen





nicht bügeln

nicht chemisch reinigen

JOBST® FarrowWrap® Zubehör

JOBST® FarrowWrap® **TG-Soft Liner**

In Kombination mit entweder FarrowWrap Lite oder Strong wird der TG-Soft Liner empfohlen, damit das Kompressionssystem nicht direkt auf der Haut aufliegt. Der TG-Soft Liner schützt die Haut und sorgt für ein angenehmes Hautgefühl. Kann mit jeder FarrowWrap Lite/Strong Versorgung paarweise kostenlos dazubestellt werden (bitte am Maßblatt unbedingt ankreuzen!).

Verfügbar für AD (knielang) und AG (oberschenkellang).











FarrowHybrid ADI: Unterziehstrumpf mit **Fußkompression**

FarrowHybrid ADI von JOBST ist ein Liner mit Fußkompression, der sich für milde bis mäßige Ödeme eignet. Auf den Fuß bis zum Knöchel wird eine Kompression von 20 - 30 mmHg ausgeübt, während die Wade keine Kompression erfährt. FarrowHybrid kann mit einem Wadenteil kombiniert werden. Erhältlich in Beige.

Farben



Beige

Maßtabellen

Untere Extremitäten



JOBST® FarrowWrap® Fußteil

Lite und Strong

Messpunkt (Angaben in cm)	XS	S	М	L	XL
A Vorderfuβumfang	22-24	25-27	28-30	31-34	35-40
l A Fuβlänge (normal)	16-17	17-18	19-20	20-21	22-23
I A Fuβlänge (lang)	18-19	19-20	21-22	22-23	24-25



JOBST® FarrowWrap® Wadenteil

Lite und Strong

OST-Tarif Pos. Nummer: 40040

Messpunkt (Angaben in cm)		XS	S	М	L	XL
C	Wadenumfang	36-43	42-50	48-58	53-63	58-68
В	Knöchelumfang	21-25	25-30	30-36	36-42	42-50
lA-D	normal	33-37	35-39	37-41	39-43	39-43
l A-D	lang	38-41	40-43	42-45	44-47	44-47



JOBST® FarrowWrap® Knieteil

Lite und Strong (bei Oberschenkelteil inkludiert)

М	esspunkt (Angaben in cm)	XS	S	М	L	XL	XXL
E	Knieumfang	47-52	53-59	60-66	67-73	74-80	81-87
C	Wadenumfang	36-43	42-50	48-58	53-63	58-68	63-73



JOBST® FarrowWrap® Oberschenkelteil Lite und Strong inkl. Knieteil OST-Tarif Pos. Nummer: 40041

Mes	spunkt (Angaben in cm)	XS	S		М		L	XL
G	Oberschenkelumfang	60-70	65-7	5	70-80	7	5-90	85-100
E	Knieumfang	47-52	53-5	9	60-66	6	7-73	74-80
Länge (in cm)		kurz			normal		lang	
<i>l</i> (E)-(G)		16-20			21-26		27-31	

Maßtabellen

Untere Extremitäten



JOBST® FarrowHybrid® ADI Liner mit Fußkompression

cA¹ 20-27 cm (Standard)	S	M	L	XL	
Schuhgröße	35-38	38-41	41-44	44-46	

Maximaler Wadenumfang: 60 cm.

Obere Extremitäten



JOBST® FarrowWrap® Armteil

Lite

OST- Tarif Pos. Nummer: 40042

Messpunkt (Angaben in cm)		S	M	L
G	Achsel	22-31	29-39	32-45
E	Ellenbogen	20-27	25-34	30-40
©	Handgelenk	14-18	16-21	19-25
Läng	e (in cm)	kurz	normal	lang
1 C-G		40-43	44-47	48-51




JOBST® FarrowWrap® Handteil Lite


Messpunkt (Angaben in cm)		xs	S	М	L
A	Umfang an den Fingerknöcheln	16-18	18-20	20-22	22-24
B	Handflächenumfang	17-19	19-21	21-23	23-26
(C)	Handgelenk	15-18	17-20	19-22	22-24

Messpunkte

Untere Gliedmaßen

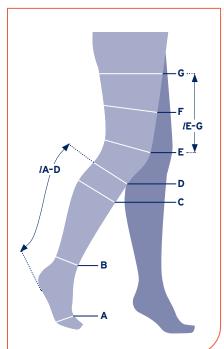


Obere Gliedmaßen

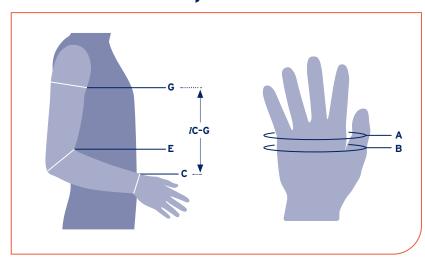

E ist 10 cm oberhalb der Kniescheibe zu messen. Zum Messen von **IA-D** (hier handelt es sich um Konturenmaße!) ist der Fuß um 90° anzuwinkeln

Länge IA-D für FarrowWrap Lite und Strong.

Entscheidungshilfe

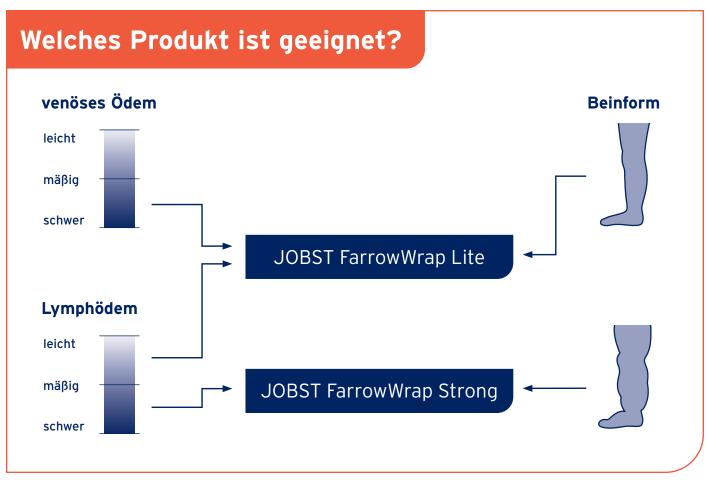



Tipps für die korrekte Verwendung



Waschhinweise

Klettverschlüsse vor dem Waschen schließen, um zu verhindern, dass sie sich verhaken. Verwenden Sie zum Schutz des Produkts stets ein Wäschenetz, wie etwa jene von JOBST®.



Wunden abdecken

Vor dem Anlegen eines JOBST FarrowWrap-Verbands sind alle betroffenen offenen Wunden mit einem geeigneten Wundverband zu bedecken. Dies ist besonders wichtig bei der Anwendung bei Ulcus Cruris Venosum.



Geeignetes Schuhwerk tragen

Sicheres Schuhwerk ist wichtig, um das Risiko von Stürzen zu verringern und die JOBST FarrowWrap-Bandagen vor frühzeitigem Verschleiβ zu schützen.



Pflege

JOBST FarrowWrap-Bandagen sind auf geeignete Weise zu pflegen, um eine längere Lebensdauer sicherzustellen. Pflegehinweise sind der beiliegenden Gebrauchsanleitung zu entnehmen.

www.jobst-austria.at www.LymphCare.com



Tel. +49(0)2822 607-333 Fax +49(0)2822 607-199